

Version Nr.: 2

**Nr: 7761 Präanalytik: Interner  
Probenversand**

gültig ab: 04.04.2019

**Klin. Institut für Labormedizin**


**Interner Probenversand**  
**Teil 1**




**Maximal 4 Belege & maximal 15  
Röhrchen pro Plastiksack**



**Überfüllte Plastiksäcke und Säcke mit  
offenen Röhrchen werden retourniert**

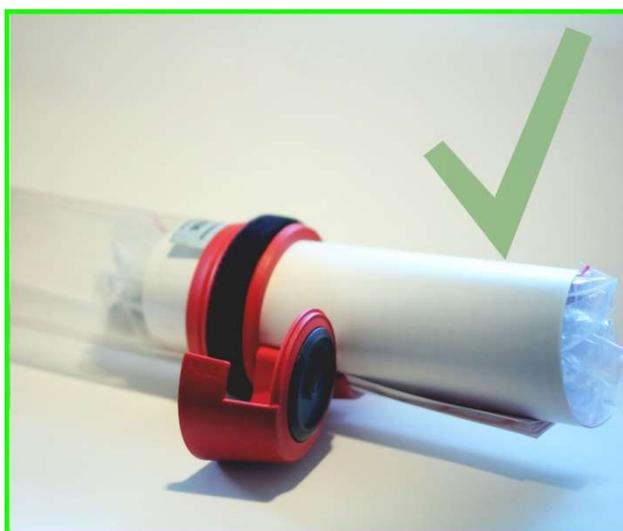

**Zusammengerollte Belege & Röhrchen in  
die Rohrpostbüchse geben**

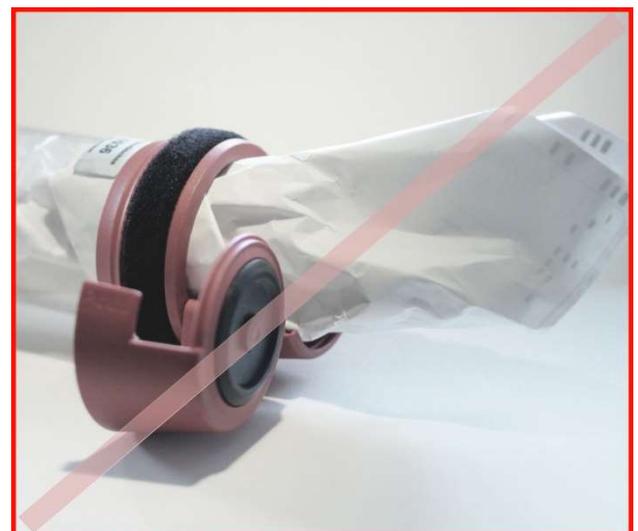

**Zerknüllte bzw. zusammengefaltene  
Belege führen zu Befundverzögerungen**


Version Nr.: 2

**Nr: 7761 Präanalytik: Interner  
Probenversand**

gültig ab: 04.04.2019

**Klin. Institut für Labormedizin**

**Interner Probenversand**  
**Teil2**

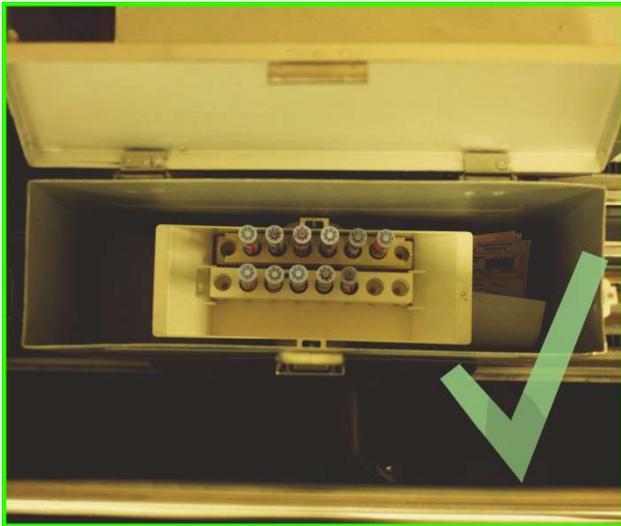

**Versand über die KB-Anlage nur mit  
dafür vorgesehenen KB-Wageneinsatz**



**KB-Wagen mit nicht fixierten Röhrrchen  
können zu Kontaminationen führen**